



# Praxis-Tipp

## Haltbarkeit / Standzeiten von DESTAsept®- Produkten

### Haltbarkeit vor erstmaliger Nutzung/Öffnung

Die Kennzeichnung mit Aufdruck des Symbols  („Sanduhr“) gefolgt von der Angabe „verwendbar bis“ und der Angabe von Monat und Jahr gibt die Haltbarkeit an, bis zu der das nicht angebrochene Produkt uneingeschränkt verwendet werden kann.

Bei Kosmetik-Produkten erfolgt die Angabe der Haltbarkeit gemäß der rechtlichen Anforderungen der Kosmetikverordnung durch den Hinweis „mindestens haltbar bis“ in Verbindung mit der Angabe von Monat und Jahr. Beträgt die Haltbarkeit mehr als 30 Monate, so erfolgt die Kennzeichnung mit dem Symbol  („geöffneter Tiegel“) und der aufgedruckten Angabe der Haltbarkeit nach Anbruch des Produktes.

### Haltbarkeit nach erstmaliger Nutzung/Öffnung

Auch nach Anbruch des Produktes ist die uneingeschränkte Verwendbarkeit von Desinfektionsmitteln grundsätzlich bis zum Erreichen des aufgedruckten Haltbarkeitsdatums gegeben. Voraussetzung hierfür ist das sorgfältige Wiederverschließen des Gebindes unmittelbar nach jeder Verwendung. Aus dem Originalgebinde entnommenes und nicht verwendetes Desinfektionsmittel (Produktreste) darf nicht in das Originalgebinde zurück gegeben werden, um Verunreinigungen des Produktes zu vermeiden.

### Haltbarkeit von Desinfektionstüchern in Spendersystemen

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten: Die Tücher bestehen aus hochwertigem, fusselarmem Vliesstoff. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden.













Die Haltbarkeit von 28 Tagen gilt für alle DOMETRA-Flächendesinfektionsmittel:

- DESTAsept® SW clean
- DESTAsept® SW sensitive
- DESTAsept® FD complete

### Haltbarkeit von Hände- / Hautdesinfektionsmitteln in Spendersystemen

Durch die bei Dosier-Spendern konstruktionsbedingt fehlende Wieder-Verschließbarkeit des Originalgebindes beträgt die Haltbarkeit von angebrochenen Gebinden in Spendersystemen 6 Monate. Voraussetzung hierfür ist, dass das Spendersystem in technisch und hygienisch einwandfreiem Zustand betrieben wird.

Insbesondere bei Wieder-Befüllung bzw. Wechsel der Gebinde ist eine Verunreinigung des neuen Produktes durch eventuelle Produktreste zu vermeiden.

Produktgruppe		Haltbarkeit vor Öffnen	Haltbarkeit nach Öffnen*	Haltbarkeit in Spendersystemen
Hände-/Hautdesinfektionsmittel		siehe:  verwendbar bis	siehe:  verwendbar bis	6 Monate**
Kosmetika / Pflegeprodukte		siehe:  verwendbar bis	siehe:  verwendbar bis	6 Monate***
Instrumenten-Desinfektionsmittel		siehe:  verwendbar bis	siehe:  verwendbar bis	nicht relevant
Flächen-Desinfektionsmittel		siehe:  verwendbar bis	siehe:  verwendbar bis	nicht relevant
Desinfektionstücher im Spendersystem	alkoholisch	siehe:  verwendbar bis	siehe:  verwendbar bis	28 Tage
	alkoholfrei	siehe:  verwendbar bis	siehe:  verwendbar bis	28 Tage

\* Absatz „Haltbarkeit nach erstmaliger Nutzung/Öffnung“ beachten!

\*\* längstens bis Erreichen der Haltbarkeit vor Anbruch

\*\*\* längstens bis Erreichen der Haltbarkeit vor Anbruch oder der Haltbarkeit nach Anbruch