

**Dosiertabelle
für die Herstellung von gebrauchsfertigen Desinfektionsmittellösungen**

Menge/ Gebrauchslösung	Konzentrat*								
	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	4,0%	5,0%
1 Liter	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	40 ml	50 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	80 ml	100 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	120 ml	150 ml
4 Liter	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	160 ml	200 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	200 ml	250 ml
6 Liter	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	240 ml	300 ml
7 Liter	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	175 ml	210 ml	280 ml	350 ml
8 Liter	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	320 ml	400 ml
9 Liter	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	225 ml	270 ml	360 ml	450 ml
10 Liter	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	400 ml	500 ml

*Konzentrat nach Tabelle mit kaltem Wasser zur angegebenen Gebrauchslösung auflösen. Beispiel: 10 Liter Gebrauchslösung 5% bestehen aus 9500 ml Wasser + 500 ml Konzentrat.

DESTAsept® FD complete

Fläche

**Bakterizid inkl. MRSA,
levurozid gem. DGHM/VAH**

- 1% - 5 Min.
- 0,75% - 15 Min.
- 0,5% - 60 Min.

**Begrenzt viruzid plus
gem. RKI Empfehlung**

- 0,5% - 15 Min.



DESTAsept® ID+R plus

Instrumente

**Bakterizid inkl. MRSA,
levurozid gem. DGHM/VAH**

- 1% - 60 Min.
- 1,5% - 30 Min.
- 2% - 15 Min.

**Viruzid gem.
RKI Empfehlung**

- 2% - 30 Min.



DESTAsept® ID+R AF

Instrumente

**Bakterizid inkl. MRSA,
levurozid gem. DGHM/VAH**

- 1% - 60 Min.
- 2% - 30 Min.
- 3% - 15 Min.

**Begrenzt viruzid
gem. RKI Empfehlung**

- 1% - 30 Min.
- 2% - 15 Min.



Varitec AG

Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler
www.varitec.de

Beratung und Bestellung

Telefon 06825 8000-110
bestellung@varitec.de